

ПОЛИДЕЗ®

концентрированное жидкое низкопенное нейтральное дезинфицирующее средство

Предназначено для дезинфекции поверхностей в помещениях, санитарно-технического и пищевого оборудования, жёсткой мебели, посуды, белья, предметов ухода за больными, игрушек, инвентаря, тары, трубопроводов и других предметов и объектов в лечебно-профилактических, детских учреждениях, на коммунальных объектах, предприятиях пищевой промышленности и общественного питания, железнодорожном транспорте, метрополитене, а также в учреждениях различного профиля. Эффективно в отношении патогенной микрофлоры различной этиологии – бактериальной, вирусной и грибковой.

Действующие вещества: перекись водорода и четвертичные аммонийные соединения (ЧАС).

Для дезинфекции поверхностей, совмещённой с мойкой, рекомендуется дезинфицирующее средство **ХИМИТЕК УНИВЕРСАЛ-ДЕЗ**. Для дезинфекции высокого уровня (ДВУ) изделий медицинского назначения, включая хирургические и медицинские инструменты, рекомендуется средство **ПОЛИДЕЗ®-СУПЕР**.

Микробиологическая активность

Средство активно в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий (включая бактерии туберкулёза), вирусов, грибов рода Кандида и Трихофитон.

Назначение

- дезинфекция поверхностей и оборудования в ЛПО, детских учреждениях, на предприятиях пищевой промышленности, объектах ветеринарного надзора, стационарных объектах железнодорожного транспорта, предприятиях транспортного комплекса;
- дезинфекция кузевов и приспособлений к ним, барокамер;
- дезинфекция комплектующих деталей наркозно-дыхательной аппаратуры, анестезиологического оборудования;
- дезинфекция медицинских отходов;
- дезинфекция медицинских инструментов (включая хирургические и стоматологические);
- дезинфекция изделий медицинского назначения;
- дезинфекция санитарного транспорта и транспорта для перевозки пищевых продуктов;
- обработка поверхностей, поражённых плесенью;
- дезинфекция воздуха, систем вентиляции и кондиционирования воздуха;
- проведение генеральных уборок;
- дезинфекция мусороуборочного оборудования;
- дезинфекция помещений и оборудования на предприятиях фармацевтической промышленности;
- дезинфекция помещений, оборудования на предприятиях общественного питания, продовольственной торговли, а также в спортивно-оздоровительных комплексах, бассейнах, банях, парикмахерских и других учреждениях различного профиля.

Особенности

- эффективно в воде любой степени жёсткости.

Состав

Перекись водорода 5–15%, алкилдиметилбензиламмоний хлорид 5–15%, поверхностно-активные вещества, вода.

Внешний вид и физико-химические свойства

Прозрачная бесцветная жидкость со слабым специфическим запахом. Показатель pH 1% раствора 5,8–7,0.

Экология

Средство подвержено быстрому разложению под действием природных факторов с образованием воды и небольших количеств кислорода.

Форма поставки

Средство поставляется в 1 л бутылках, 5 л, 10 л и 20 л канистрах в комплекте с крышками с дегазирующими клапанами.



Способ применения

Средство используют в виде 0,25–10% рабочих растворов, которые готовят в стеклянных, пластмассовых или эмалированных ёмкостях добавлением концентрата в воду. Температурный режим разведения и применения – от 20 до 50 °С.

Дезинфекцию проводят рабочими растворами средства способами протирания, циркуляции, замачивания, погружения, орошения.

После этапа мойки мыльными растворами или средствами, содержащими анионные ПАВы, требуется их обязательное смывание (ополаскивание).

Срок годности рабочих растворов – не менее 7 суток.

Способы применения изложены в следующих документах:

- для лечебно-профилактических учреждений, работников дезинфекционных и санитарно-эпидемиологических служб, а также других учреждений, имеющих право заниматься дезинфекционной деятельностью – «Методические указания по применению дезинфицирующего средства **ПОЛИДЕЗ**» Минздрава РФ;
- для предприятий мясной и мясоперерабатывающей промышленности – «Инструкция № 6 по применению средства дезинфицирующего с моющим эффектом **ПОЛИДЕЗ** для целей дезинфекции на предприятиях мясной промышленности» ГНУ ВНИИ МП им. В.М.Горбатова РАСХН;
- для предприятий молочной промышленности – «Инструкция № 5 по применению средства дезинфицирующего с моющим эффектом **ПОЛИДЕЗ** для целей дезинфекции на предприятиях молочной промышленности» ГНУ ВНИИМИ РАСХН;
- для предприятий кондитерской промышленности – «Инструкция № 8 по применению дезинфицирующего средства с моющим эффектом **ПОЛИДЕЗ** для целей дезинфекции на предприятиях кондитерской промышленности» ГУ НИИКП РАСХН;
- для предприятий хлебопекарной промышленности – «Инструкция № 7 по применению дезинфицирующего средства с моющим эффектом **ПОЛИДЕЗ** для целей дезинфекции на предприятиях хлебопекарной промышленности» ГОСНИИХП РАСХН;
- для железнодорожного транспорта и метрополитена – инструкция по применению дезинфицирующего средства **ПОЛИДЕЗ** на объектах железнодорожного транспорта и метрополитена ФГУП ВНИИ железнодорожной гигиены.
- для предприятий различного профиля – в инструктивных и методических материалах НПФ Химитек.

Безопасность

По степени воздействия на организм человека средство относится к 4-му классу опасности (вещества малоопасные) при нанесении на кожу и при ингаляционном воздействии летучих компонентов (пары), при введении в желудок к 3-му классу опасности (вещества умеренно опасные) по ГОСТ 12.1.007-76.

Избегать попадания средства в глаза и на кожу. При работе со средством рекомендуется пользоваться резиновыми перчатками, защитными очками. Хранить в недоступном для детей месте.

В случае попадания средства в глаза или на кожные покровы рекомендуется промывание проточной водой.

Более полная информация по безопасному обращению с данным продуктом приведена в паспорте безопасности.

Хранение

Хранить в сухих крытых складских помещениях в герметично закрытой таре в защищённом от света месте, вдали от источников тепла, кислот, щелочей, тяжёлых металлов и их соединений, а также сильных окислителей при температуре окружающей среды не выше 20 °С. Высота штабеля при хранении и транспортировании в картонных ящиках не должна превышать 2,5 м, а для групповых упаковок – 1,5 м. Срок годности 2 года при соблюдении условий хранения в невскрытой упаковке производителя.